

# AFOMILL®

## LUBRIFICANTE

gocce oculari  
NON BRUCIA

### INDICAZIONI:

AFOMILL LUBRIFICANTE è una soluzione oftalmica isotonica tamponata lubrificante.

Il sodio ialuronato contenuto, già presente nel vitreo e nel tessuto connettivo, vanta proprietà lubrificante della superficie oculare, prevenendo eventuali irritazioni. Ideale nel trattamento della secchezza oculare in genere (utilizzo di lenti a contatto, uso prolungato di videoterminali, aria inquinata, polvere, età avanzata, terapie farmacologiche: antidepressivi, ansiolitici, ormoni e antistaminici). Ha pH, isotonicità e osmolarità perfettamente compatibili col tessuto oculare e col liquido lacrimale.



Agenti esterni



Lenti a contatto



Tv e computer

### COMPOSIZIONE:

**Flacone multidose:** Acido ialuronico sale sodico 0,2%, Acqua distillata di Camomilla, Sodio idrossimetilglicinato, Sodio fosfato monobasico monoidratato, Sodio fosfato bibasico dodecaidrato, Sodio cloruro, EDTA, Acqua q.b.

**Fiale monodose:** Sodio cloruro, Acido ialuronico (sale sodico), Acqua distillata di Camomilla, Sodio fosfato bibasico dodecaidrato, Sodio fosfato monobasico monoidrato, Acqua q.b.

### ISTRUZIONI D'USO:


**Flacone multidose:** instillare alcune gocce in ciascun occhio esercitando una lieve pressione sul corpo del flacone. Dopo l'uso richiudere bene il tappo.

**Fiale monodose:** separare un monodose, aprire la fiala ruotando il cappuccio. Premere leggermente la fiala ed instillare alcune gocce in ciascun occhio.

Non contiene benzalconio cloruro.

Può essere utilizzato anche da chi porta lenti a contatto.

Afomill può essere utilizzato anche più volte al giorno.

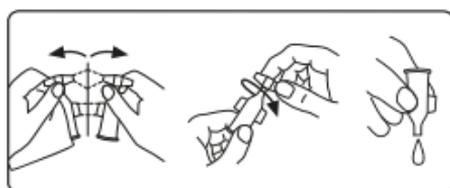

### **⚠ PRECAUZIONI E AVVERTENZE:**

- Il prodotto è indicato solo per uso oftalmico.
- Non utilizzare il prodotto in caso di confezione danneggiata, nè dopo la data di scadenza riportata sulla confezione.
- Non toccare l'occhio con l'estremità del flacone o della fiala.
- Se il prodotto viene utilizzato in modo continuativo per più di trenta giorni, è necessario consultare il medico.
- Evitare il contatto della fiala o del beccuccio del flacone con superfici che potrebbero inquinarli.
- Non usare in caso di nota incompatibilità verso qualsiasi componente della preparazione.
- Il flacone multidose deve essere utilizzato entro 28 giorni dall'apertura.
- Il contenuto delle fiale deve essere utilizzato interamente all'atto dell'apertura.
- Conservare al riparo dalla luce e da fonti di calore.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

### **CONFEZIONI:**

- Flacone multidose 10 ml.
- 10 Fiale monodose da 0,5 ml cad.

**STERILE A** **CE** 0546

*Data revisione foglietto illustrativo: settembre 2014*



**AEFFE FARMACEUTICI Srl**  
Via Torino, 448 - Brandizzo (TO)

*Distributore esclusivo: Afom Medical Srl*  
Via IV Novembre, 92 - 20021 Bollate (MI)